

Neu-Tec GmbH · Austmannshof 7 · D-33803 Steinhagen

## Kurz- Gebrauchsanweisung für die Benutzung vom „Air One“

Das Gerät sollte in der horizontalen Position hängen oder stehen (in einer Höhe von ca. 0,40 bis 1,50 m; ein bisschen nach hinten geneigt).

Nehmen Sie den Topfdeckel (Nebelkammerdeckel) von dem Vernebler.

Füllen Sie 60 ml Kontaktflüssigkeit in den Vernebler.

Das Kontaktmittel wird nur erneuert, wenn die Wasserstandsleuchte aufleuchtet oder eine optische Verschmutzung vorliegt. Wenn der Vernebler längere Zeit nicht genutzt wird, entfernen Sie bitte die Kontaktflüssigkeit und befüllen Sie das Gerät erst wieder bei erneutem Gebrauch.

Der Schwinger darf nicht mit einem scharfen Gegenstand gereinigt werden.

Stellen Sie den Becher mit 50 ml Kochsalzlösung, evtl. mit dem vorgesehenen Medikament, in den Vernebler. **Bitte keine ätherischen Öle benutzen!!!**

Sie können alles vernebeln, was sich mit Wasser verbindet.

Setzen Sie den Nebelkammerdeckel wieder auf den Vernebler.

Danach setzen Sie dem Pferd die Maske von der Kehle nach oben über die Nüstern.

Bringen Sie den Schlauch an die entsprechenden Stutzen (an den Nebelkammerdeckel und an den Stutzen der Maske)

**Dabei muss der Atemschlauch mit einer Rechtsdrehung auf- und abgedreht werden.**

Danach regulieren Sie an der Belüftungsscheibe die Luftzufuhr.

Bei Beginn der Inhalation sollte die Luftzufuhr ganz offen sein. Ziel ist aber mit geschlossener Luftzufuhr zu inhalieren.

**Das Pferd muss die Inhalation (Ventilation) erlernen und ist von Pferd zu Pferd völlig unterschiedlich und somit die Inhalationszeit!**

Wenn Sie zu inhalieren beginnen schalten Sie den Knopf „Ein/Aus“ ein.

Eine Inhalation beträgt ca. 10 Min. bis höchstens 20 Min je nach Ventilation des Pferdes. Danach sollte das Pferd bewegt werden.

### Wichtige Info:

Falls sich, während der Inhalation vermehrt Wasser im Atemschlauch sammeln sollte, muss der Neigungswinkel des Gerätes nach hinten, vorne höher, verändert werden.

### Desinfektion

Füllen Sie das Konzentrat in eine Sprühflasche mit 20 ml auf 1000 ml Wasser und nach Gebrauch sprühen Sie die Maske und den Schlauch damit ein. Danach spülen Sie die Maske mit kaltem oder warmem Wasser aus, den Schlauch spülen Sie mit Wasser nach.